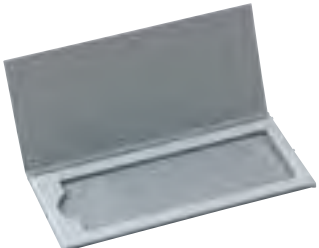


1 プレイン容器  容量 9mL 内容 分離剤 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - 生化学的検査 - 薬物検査 - 免疫学的検査 - ウイルス感染症検査 - 内分泌学的検査	6 アンモニア用  採取量 血液1mL正確に 内容 除蛋白液 (タンガスミン・トリカム) 貯蔵方法 室温 有効期間 6ヶ月 適用検査項目 血中アンモニア ・採血後、直ちに正確に1.0mLを専用容器に加え、充分攪拌後、速やかに遠心分離し、その上清をご提出ください。 ・上清分注後、凍結保存願います ・真空採血厳禁	13 EDTA-2Na 入  採取量 血液7mL・5mL 内容 EDTA-2Na 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - ACTH - レニン活性 - カテコールアミン - クロスマッチ - BNP - など
2 滅菌スピッツ  容量 10mL 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - 尿一般検査 - 髄液・穿刺液検査 - 関節液検査 - 精液検査 ・新鮮尿を冷蔵保存にてご提出ください。 ・尿一般検査については中間尿を採取してください。	9 便ヘモグロビン  採取量 適当量 内容 緩衝液 貯蔵方法 室温 有効期間 表示通り 適用検査項目 - 便ヘモグロビン - 便Hb・Tf ・容器中の緩衝液は捨てないでください。 ・採便時の食事制限はありません。 ・採取方法は本文P6を参照願います。	16 EDTA-2Na+ アプロチニン  採取量 血液 3mL 内容 EDTA-2Na アプロチニン 貯蔵方法 室温 有効期間 表示通り 適用検査項目 - HANP - グルカゴン - PTHrP
4 乳酸・ピルビン酸  採取量 血液 1mL 内容 1N 過塩素酸 1mL 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 3ヶ月 適用検査項目 - 乳酸 - ピルビン酸 ・氷冷1.0N 過塩素酸1.0mLに血液1.0mLを入れよく混和し除蛋白後15～60分静置し、遠心分離を行ってください。上清分離後凍結。	10 便検査用  採取量 便 1g 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - 便虫卵(集卵・塗抹) - 便培養 - 病原大腸菌 O-157 - ノロウイルス抗原 - など	17 血糖用  採取量 血液 1mL 内容 フッ化Na、ヘパリンNa EDTA-2Na 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - 血糖 - ヘモグロビン A1c ・採血後、よく混和させ冷蔵保存願います
5 血球用  採取量 血液 2mL 内容 EDTA-2K 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - 末梢血一般検査 - 血液像(白血球分類) - ABO式血液型 - Rh式(D)血液型 - 直接クームス試験 ・溶血・凝固及び凍結検体は測定不可	11 尿中 FDP  採取量 尿 1mL 内容 トロンビン様酵素 貯蔵方法 室温 有効期間 1年6ヶ月 適用検査項目 - 尿中 FDP ・抗プラスミン剤とトロンビン入り容器に新鮮尿1.0mL採取し、容器のままご提出ください。	19 ヘパリン  採取量 血液5mL・10mL 内容 ヘパリン Na 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 - 細胞性免疫検査 ・リンパ球が少ない患者は多めに採血願います。 ・検体採取後は、当日中にご提出ください。

23	3.2%クエン酸 Na 入り	30	シードスワブ	35	遮光用尿容器
					
採取量 1.8mL・4.5mL		内容 キャリーブリア改良培地・変法アミース培地		容量 10mL・100mL	
内容 3.2%クエン酸ナトリウム		適用検査項目 一般細菌培養同定		貯蔵方法 室温	
貯蔵方法 室温		・採取後は冷蔵保存願います (目的菌が淋菌、髄膜炎菌の時は常温保存)		有効期間 無期限	
有効期間 1年		貯蔵方法 室温		適用検査項目 17-KS7 分画 尿中 5SCD 尿コプロポルフィリン	
適用検査項目 プロトロンビン時間 APTT AT-Ⅲ、FDP フィブリノーゲン ヘパラスチンテスト D-D ダイマー 凝固因子検査		有効期間 表示通り			
27	β-TG、PF4	31	赤 沈 用	36	蛍光抗体法専用スライド
					
採取量 血液 2.7mL		採取量 血液 1.6mL		貯蔵方法 室温	
内容 クエン酸Na、テオフェリン、クエン酸、アミノ酸、シリカゲル		内容 3.8%クエン酸ナトリウム		有効期間 1年	
貯蔵方法 遮光・冷蔵		貯蔵方法 室温		適用検査項目 単純ヘルペス特異抗原 水痘ウイルス抗原	
有効期間 1年		有効期間 1年		・採取方法はP108参照願います。	
適用検査項目 血小板第4因子 β-TG		適用検査項目 血沈			
		・採血後、当日中にご提出願います。 ・血液1.6mLを採取し、転倒混和後、冷蔵保存			
28	カルチャーボトル	32	サコマノ液入り喀痰容器	39	肺癌 3 日連続 (柴田氏法) 用
					
採取量 血液 5～10mL		内容 サコマノ氏液 (DTT 液)		内容 55%エタノール	
貯蔵方法 室温		貯蔵方法 室温		貯蔵方法 室温	
有効期間 表示通り		有効期間 1年		有効期間 6ヶ月	
適用検査項目 好気性菌培養同定 真菌培養同定 嫌気性菌培養同定		適用検査項目 肺癌集細胞法		適用検査項目 肺癌 3 日連続法	
29	嫌気ポーター	33	ウイルス分離用	40	喀痰容器
					
内容 保存培地 CO ₂		内容 ウイルス専用保存液入り		貯蔵方法 室温	
貯蔵方法 冷蔵		貯蔵方法 冷蔵		有効期間 無期限	
有効期間 1年		有効期間 6ヶ月		適用検査項目 結核菌 DNA-PCR MACDNA-PCR 培養同定 喀痰	
適用検査項目 嫌気性培養		適用検査項目 ウイルス分離・同定			

41 病理組織容器  容量 50mL 貯蔵方法 室温 有効期間 無期限 適用検査項目 病理組織検査	50 ヘリコバクター培養用  貯蔵方法 冷蔵 有効期間 容器表示 適用検査項目 ヘリコバクター培養	63 血漿用ウイルス遺伝子検査用  採取量 血液 8mL 内容 EDTA-2K 血漿分離剤 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 HIV-1RNA 定量 / リアルタイム PCR
43 NK 細胞活性用  採取量 血液 5mL 内容 保存液 0.7mL 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年 適用検査項目 NK 細胞活性	53 標本用スライドガラス  貯蔵方法 室温 有効期間 無期限 適用検査項目 骨髓像 末血 ALP 染色 特殊染色 鼻汁喀痰中好酸球	64 尿中4型コラーゲン専用容器  採取量 早朝第一尿 5mL 内容 0.5mL トリス塩酸 緩衝液 (pH7.5) 貯蔵方法 室温 有効期間 3年 適用検査項目 尿中4型コラーゲン
48 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ  貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ	55 尿中 NMP22  採取量 尿 5mL 内容 尿安定化剤 貯蔵方法 遮光・室温 有効期間 2年 適用検査項目 尿中 NMP22	65 糞便中ヘリコバクターピロリ抗原検査  採取量 適当量 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 便中ヘリコバクター ピロリ抗原
49 尿ミオグロビン用  容量 保存剤入り 10mL 貯蔵方法 室温 有効期間 2年 適用検査項目 尿ミオグロビン	59 ヒトパピローマウイルス DNA  内容 保存液 貯蔵方法 室温 有効期間 容器表示 適用検査項目 HPV (ハイリスク) HPV (ローリスク) 妊婦用 一般用	66 ウイルス遺伝子検査用  採取量 血液 5mL 内容 凝固促進剤 血清分離剤 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 HBV 核酸定量 / リアルタイム PCR HCV-RNA 定量 / リアルタイム PCR HCV-RNA コアジェノタイプ

68 ACD-A 液 (PA・IgG 用) 	採取量 血液 7.5mL 貯蔵方法 室温 有効期限 1 年 適用検査項目 PA・IgG (血小板関連 IgG)	101 PCR 専用容器：ぬぐい液 	採取量 ー 内容 塩酸グアニジン 貯蔵方法 室温 有効期間 容器表示 適用検査項目 クラミジア-DNA 淋菌-DNA (TaqManPCR 法)	105 Lamp 専用容器 	採取量 貯蔵方法 室温 有効期間 1 年 適用検査項目 マイコプラズマ核酸検出 (咽頭ぬぐい液) ・咽頭ぬぐい液は、滅菌 綿棒で拭い、容器に綿 棒を入れて凍結保存 ・他項目との重複依頼は 避けてください。
69 EDTA-2K 入り 	採取量 血液 2mL 内容 EDTA-2K 貯蔵方法 室温 有効期間 1 年 適用検査項目 シクロスポリン タクロリムス ビタミン B ₁ ビタミン B ₂	102 PCR 専用容器：尿 	採取量 尿 4.5mL 内容 塩酸グアニジン 貯蔵方法 室温 有効期間 容器表示 適用検査項目 クラミジア-DNA 淋菌-DNA (TaqManPCR 法)	106 Lamp 専用容器 	採取量 貯蔵方法 室温 有効期間 1 年 適用検査項目 マイコプラズマ核酸検出 (喀痰)
70 細胞診 (婦人科 C-R 法) 	内容 Thinlayer 法保存液 貯蔵方法 室温 有効期間 2 年 適用検査項目 ヒトパピローマ ウィルス (HPV) DNA 型判定 (ハイリスク13種)	103 PCR 専用容器：うがい液 	採取量 4.5mL 内容 塩酸グアニジン 貯蔵方法 室温 有効期間 容器表示 適用検査項目 クラミジア-DNA 淋菌-DNA (TaqManPCR 法)	107 T-SPOT・TB 専用容器 	採取量 血液 10mL 内容 ヘパリン Na 貯蔵方法 室温 有効期間 1 年 適用検査項目 T-SPOT・TB
71 保存液入り マルク用 	内容 RPMI-1640 FBS 硫酸カナマイシン ノボヘパリン Na 炭酸水素 Na HEPES 貯蔵方法 凍結 有効期間 色が薄いピンク の状態で使用し てください。 (凍結時は淡黄色 ですが解凍する と薄いピンク色 に戻ります。) 適用検査項目 WT1mRNA 定量	104 HIV1,2 抗体 専用 	採取量 血液 5mL 内容 血清分離剤凝固促 進用シリカ微粒子 貯蔵方法 室温 有効期間 1 年 適用検査項目 HIV-1/2 抗体確認検査 採血後、遠心分離し、そ のままご提出ください。	108 アルミニウム専用容器 	採取量 血液 3mL 内容 凝固促進剤 トロンピン/ヘパリン中和剤 貯蔵方法 室温 有効期間 表示通り 適用検査項目 アルミニウム (Al) 血液3mLを採取し、5～ 6回ほど静かに転倒混和 したのち、速やかに遠心 分離し、そのまま冷蔵保 存してください。

110 ヒト癌胎児性フィブロネクチン	114 百日咳菌核酸検出
	
内容 抽出液 貯蔵方法 室温 有効期間 1年 適用検査項目 ヒト癌胎児性 フィブロネクチン	後鼻腔ぬぐい液 貯蔵方法 室温 有効期間 3年 適用検査項目 百日咳菌核酸検出 / LAMP
111 細胞性免疫骨髄液容器	116 メチルイソブチルケトン
	
容量 7mL 内容 10% FBS 加 RPMI1640 ヘパリン Na 貯蔵方法 到着後凍結 ドライアイス不可 有効期間 製造後冷凍1年 適用検査項目 細胞性免疫検査 (骨髄液) ・使用時に解凍していた だき、濁りや溶液が変 色している場合は使 用しないでください。 検体採取後は冷蔵で ご提出ください。	容量 15mL 貯蔵方法 室温 有効期限 無期限 適用検査項目 メチルイソブチル ケトン ・揮発性物質のため、容 器内に空間部分（気 相部分）を作らないよ う尿を入れてください。 ・採尿後は直ちに付属の スクリーキャップで 密栓してください。 ・凍結保存はできません。
112 細胞性免疫リンパ節その他容器	121 TFP12 専用容器
	
容量 15mL 内容 10% FBS 加 RPMI1640 貯蔵方法 到着後凍結 ドライアイス不可 有効期間 製造後1年 適用検査項目 細胞性免疫検査 ・使用時に解凍していた だき、濁りや溶液が変 色している場合は使 用しないでください。 検体採取後は冷蔵で ご提出ください。	容量 5mL 貯蔵方法 室温 有効期限 容器表示 適用検査項目 TFP12
113 エンドトキシン・β-D グルカン	122 CMV 核酸定量用
	
採取量 血液 3mL 内容 ノボヘパリン 15IU 貯蔵方法 室温 有効期間 2年 適用検査項目 エンドトキシン β-D グルカン ・キャップを取らずに血 液3mLを無菌的に採 取し、5～6回ほど静 かに転倒混和したの ち、そのまま冷蔵保 存してください。 ・他項目との重複依 頼は避けてください。 ・透析液の測定はでき ません。	採取量 5mL 内容 EDTA-2K 血漿分離剤 貯蔵方法 4～25℃ 有効期間 1年 適用検査項目 CMV 核酸定量