

新規受託項目と中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび下記の検査項目につきまして新規受託と中止のご案内をさせていただきます。
今後とも変わらぬご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 新規受託開始日 2026年11月2日（月）受付分より

● 新規受託項目

項目コード	検査項目 JLAC10	検体量（mL）	容器	保存 （安定性）	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 （単位）
3677	抗核抗体 5G010-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	110 （免疫）	CLEIA法	index:10.0未満
3678	抗Sm抗体定量 5G065-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	147 （免疫）	CLEIA法	10.0未満 （U/mL）
3679	抗RNP抗体定量 5G066-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	144 （免疫）	CLEIA法	10.0未満 （U/mL）
3680	抗SS-A/Ro抗体定量 5G076-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	161 （免疫）	CLEIA法	10.0未満 （U/mL）
3681	抗SS-B/La抗体定量 5G077-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	153 （免疫）	CLEIA法	10.0未満 （U/mL）
3682	抗Scl-70抗体定量 5G085-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	157 （免疫）	CLEIA法	10.0未満 （U/mL）
3683	抗Jo-1抗体定量 5G120-0000-023-052	血清 0.3	1	冷蔵	3～4	140 （免疫）	CLEIA法	10.0未満 （U/mL）

当該項目受託開始に伴い、下記の項目を受託中止とさせていただきます。

● 受託中止日 2026年11月2日（月）受付分より


● 受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード	検査項目	代替項目
92	5034	抗核抗体/FEIA	新規受託項目をご利用ください。
	3248	抗Sm抗体	
	3322	抗RNP抗体（抗U1-RNP抗体）	
	4969	抗SS-A抗体（抗SS-A/Ro抗体）	
	4970	抗SS-B抗体（抗SS-B/La抗体）	
93	4971	抗Scl-70抗体	
	4972	抗Jo-1抗体	

裏面に続く

<新旧二法の相関>

抗核抗体

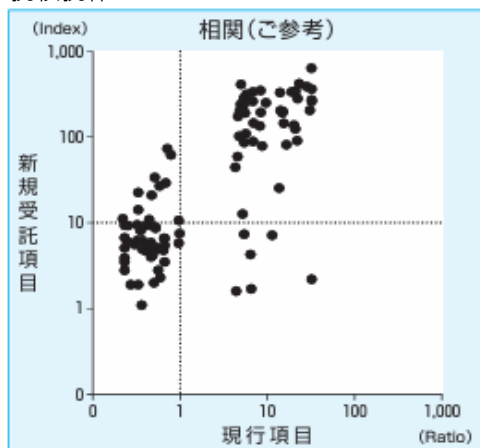

判定一致率		現行		
		+	-	合計
新規	+	44	11	55
	-	6	39	45
	合計	50	50	100


陽性一致率：88.0%

陰性一致率：78.0%

判定一致率：83.0%

委託先資料より

抗Sm抗体定量（抗Smd抗体定量）

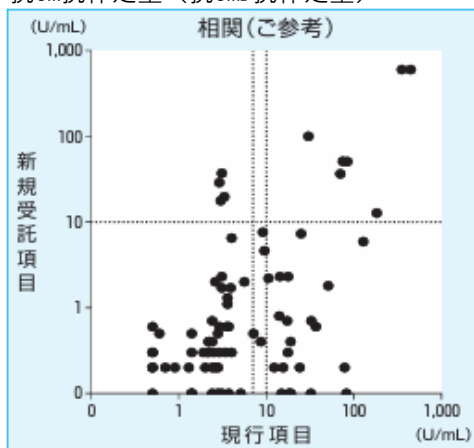

判定一致率		現行			
		+	±	-	合計
新規	+	7	0	4	11
	-	21	4	46	71
	合計	28	4	50	82

※一致率(%)は従来法の(±)を(+)に含めております。


陽性一致率：21.9%

陰性一致率：92.0%

判定一致率：64.6%

委託先資料より

抗RNP抗体定量（抗U1-RNP抗体定量）

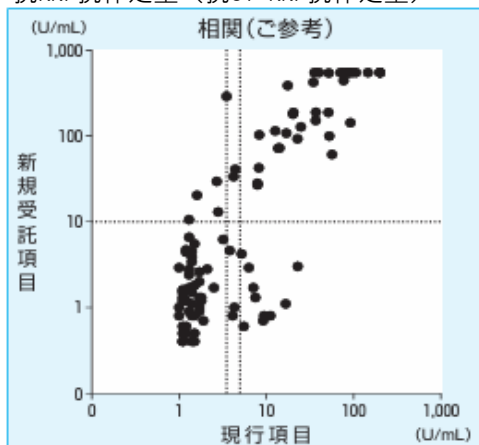

判定一致率		現行			
		+	±	-	合計
新規	+	34	3	4	41
	-	10	3	46	59
	合計	44	6	50	100

※一致率(%)は従来法の(±)を(+)に含めております。


陽性一致率：74.0%

陰性一致率：92.0%

判定一致率：83.0%

委託先資料より

抗SS-A/Ro抗体定量

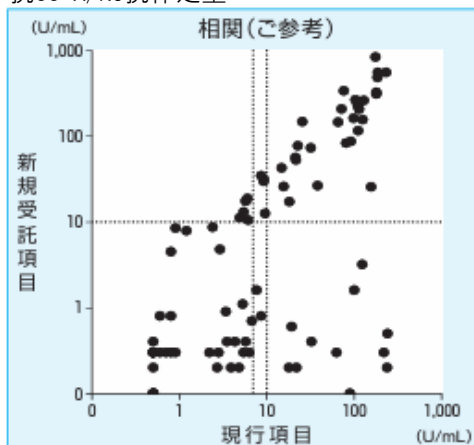

判定一致率		現行			
		+	±	-	合計
新規	+	33	4	5	42
	-	11	2	34	47
	合計	44	6	39	89

※一致率(%)は従来法の(±)を(+)に含めております。

陽性一致率：74.0%


陰性一致率：87.2%

判定一致率：79.8%

委託先資料より

次頁へ続く

抗SS-B/La抗体定量

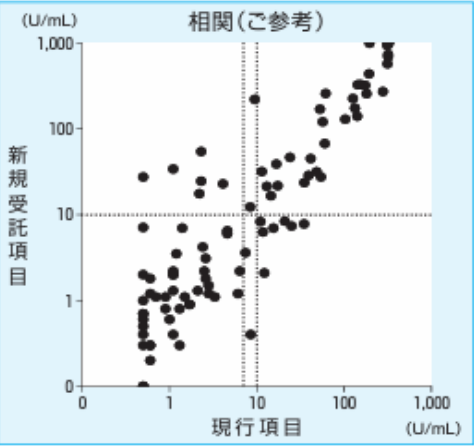


判定一致率		現行			
		+	±	-	合計
新規	+	39	2	6	47
	-	7	2	44	53
	合計	46	4	50	100

※一致率(%)は従来法の(±)を(+)に含めております。
陽性一致率：82.0%
陰性一致率：88.0%
判定一致率：85.0%

委託先資料より

抗Scl-70抗体定量

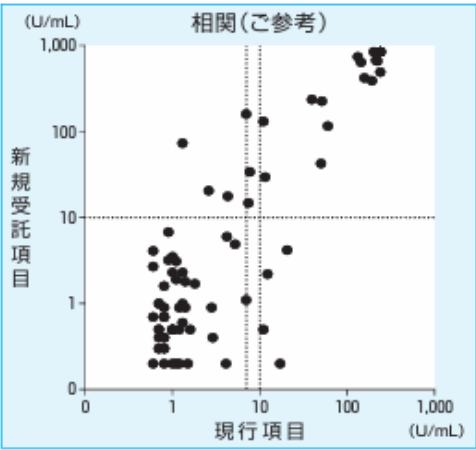


判定一致率		現行			
		+	±	-	合計
新規	+	20	3	3	26
	-	4	1	47	52
	合計	24	4	50	78

※一致率(%)は従来法の(±)を(+)に含めております。
陽性一致率：82.1%
陰性一致率：94.0%
判定一致率：89.7%

委託先資料より

抗Jo-1抗体定量

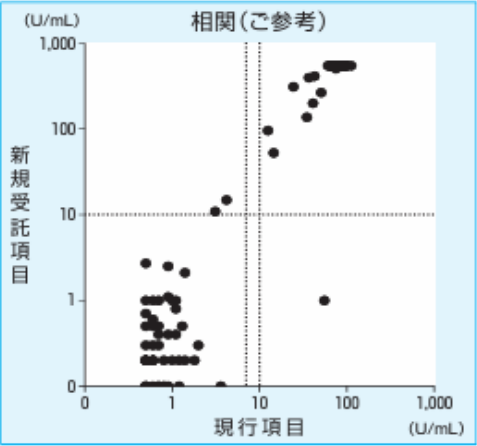

判定一致率		現行			
		+	±	-	合計
新規	+	30	0	2	32
	-	1	0	48	49
	合計	31	0	50	81

※一致率(%)は従来法の(±)を(+)に含めております。
陽性一致率：96.8%
陰性一致率：96.0%
判定一致率：96.3%

委託先資料より